

**Acrorest™****Дихлорэтановый клей****Назначение**

Дихлорэтановый клей **Acrorest** предназначен для технологической фиксации отломков акриловых пластиночных протезов при починке самотвердеющей пластмассой.

**Состав и свойства**

Дихлорэтановый клей **Acrorest** представляет собой раствор полиметилметакрилата в дихлорэтаноле. Это прозрачная или мутноватая жидкость с вязкостью раствора клея (в соотношении 1:10) 2,0-4,0 мм<sup>2</sup>/с и достаточно высокой прочностью склеивания, наступающей через 16 – 20 часов. При осторожном обращении с протезом, через 30 минут можно приступить к отливке гипсовой модели и контрмодели.


**Способ применения**

Для фиксации частей поломанного протеза на поверхность излома кисточкой наносят равномерный слой клея **Acrorest**. Клею дают высохнуть до исчезновения липкости. Наносят второй слой клея. Складывают части протеза по линии излома и прочно удерживают 3-4 минуты в правильном положении. Далее приступают к починке самотвердеющей пластмассой, если части протеза имеют достаточную фиксацию.

**Условия хранения и маркировка**Условия хранения

**Acrorest** в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

ЧП "Латус"  
61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,  
Тел. +380577332697  
www.latus.com.ua

**Acrorest™****Діхлоретановий клей****Призначення**

Діхлоретановий клей **Acrorest** призначений для технологічної фіксації відломків акрилових пластиночних протезів при полагодженні самотверднучою пластмасою.

**Склад та властивості**

Діхлоретановий клей **Acrorest** представляє собою розчин поліметилметакрилату у діхлоретані. Це прозора чи мутнувата рідина з в'язкістю розчину клею (у співвідношенні 1 : 10) 2,0-4,0 мм<sup>2</sup>/с та достатньо великою міцністю склеювання, що настає через 16 – 20 годин. У разі обережного застосування протезу, через 30 хвилин можна починати відливання гіпсової моделі та контрмоделі.

**Спосіб застосування**


Для фіксації частин поламаною протезу на поверхню злому пензликком наносять рівномірний шар клею **Acrorest**. Клею дають висохнути до зникнення липнення. Наносять другий шар клею.

Складають частини протезу вздовж лінії злому та міцно утримують 3-4 хвилини у правильному положенні. Далі беруться до полагодження самотверднучою пластмасою, якщо частини протезу мають достатню фіксацію.

**Умови зберігання та маркування**Умови зберігання

**Acrorest** в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Маркування

Символ  вказує рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

ПП "Латус"  
61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82,  
Тел. +380577332697  
www.latus.com.ua