

## Инструкция по применению

Редакция 12.2019

# Desgel®

Антисептический гель  
для обработки корневых каналов

### Назначение

Desgel предназначен для антисептической обработки корневых каналов как антибактериальное средство после инструментальной обработки канала.

### Свойства

Desgel изготовлен на основе антисептического агента, активного в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Препарат стабилен и сохраняет активность в присутствии крови и гноя.

Обладает достаточной вязкостью для обработки полостей зубов верхней челюсти и щадяще воздействует на слизистую оболочку полости рта.

Desgel следует использовать после тщательного удаления следов гипохлорита натрия из корневого канала.

### Способ применения

Небольшое количество геля вносят через игольную насадку на шприц непосредственно в корневой канал.

Дают выдержку 2-3 минуты, по окончании времени выдержки гель смывают водой. Затем канал высушивают сжатым воздухом.

Далее приступают к заполнению корневого канала выбранным пломбировочным материалом.

### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.



ЧП «Латус»  
61010 г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



**Только для  
профессионального  
использования**



LaTuS

## Інструкція по застосуванню

Редакція 12.2019

# Desgel®

Антисептичний гель  
для обробки корневих каналів

### Призначення

Desgel призначений для антисептичної обробки корневих каналів як антибактеріальний засіб після інструментальної обробки каналу.

### Властивості

Desgel виготовлен на основі дезінфікуючого агента, який активний у відношенні до грампозитивних і грамнегативних бактерій. Препарат стабільний і зберігає активність в присутності крові та гною.

Володіє достатньою в'язкістю для обробки порожнин зубів верхньої щелепи і щадяще впливає на слизову оболонку ротової порожнини.

Desgel слід використовувати після ретельного видалення слідів гіпохлориту натрію з кореневого каналу.

### Спосіб застосування

Невелику кількість гелю вносять через гольну насадку на шприц безпосередньо в кореневий канал. Дають витримку протягом 2-3 хвилин, після часу витримки гель

змивають водою. Потім канал висушують стисненим повітрям. Далі можна приступати до заповнення кореневого каналу обраним пломбувальним матеріалом.

### Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.



ПП «Латус»  
61010 м. Харків  
вул. Текстильна, 82  
тел. + 380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



**Тільки для  
професійного  
використання**



LaTuS