



Devilat®

Паста для девіталізації

Склад пасти

48 % параформальдегід
37 % лідокаїну гідрохлорид
1 % камфора, гліцерин, силікатний наповнювач до 100%.

Призначення

-Швидка та безболісна девіталізація пульпи перед повним або частковим її видаленням.

-Лікування залишкового кореневого пульпиту і пульпиту постійних зубів.

-Додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як.

Властивості

Матеріал стоматологічний Devilat без миш'яку являє собою готову до застосування пасту білого кольору, яка містить:

-параформальдегід - антисептик, коагулюючий білки, забезпечуючи девіталізацію пульпової тканини,

-лідокаїну гідрохлорид - локально анестезуючий засіб, який знижує ймовірність виникнення хворобливих реакцій при девіталізації пульпи,

-камфору - яка має протимікробну, знеболювальну та протизапальну дію.

Спосіб застосування

На попередньо очищену і широко розкрити порожнину зуба накладають необхідну кількість пасти Devilat, уникаючи натискання. Кількість накладання пасти залежить від клінічного випадку і складає приблизно кульку 2 мм в діаметрі. Потім порожнину без тиску герметично покривають водним дентином Tempolat-SC.

Повна девіталізація пульпи відбувається протягом 3-5 днів. Після девіталізації

пульпи і при відсутності больових відчуттів можна проводити екстирпацію пульпи і подальше лікування. У разі прояву больових відчуттів застосування пасти Devilat може бути повторено.

Побічні дії

При правильному зберіганні та дотриманні інструкції по застосуванню побічні дії відсутні.

Попередження

Індивідуальна непереносимість.

Запобіжні заходи

Проінформувати пацієнта про склад.

Протипоказання

-Алергія на лідокаїну гідрохлорид, формальдегід та інші складові частини пасти.

-Уникати передозування.

-При ковтанні значної кількості препарату звернутися до лікаря.

Утилізація

Використані вироби не становлять небезпеку для навколишнього природного середовища, і можуть бути утилізовані спільно з побутовими відходами.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 0°C до +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.

Термін зберігання: 2 роки.

Вміст пакування

Паста в шприці по 3 г

Інструкція по застосуванню



ПП «Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна, 82

тел. + 380577332697

www.latus.com.ua

Тільки для професійного



UA.TR.130



LaTuS **Devilat®**

Паста для девитализации

Состав пасты

48% параформальдегид
37% лидокаина гидрохлорид
1% камфора, глицерин, силикатный наполнитель до 100%.

Назначение

- Быстрая и безболезненная девитализация пульпы перед полным или частичным ее удалением.
- Лечение остаточного корневого пульпита и пульпита постоянных зубов.
- Дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк.

Свойства

Материал стоматологический Devilat без мышьяка представляет собой готовую к применению пасту белого цвета, содержит:

- параформальдегид - антисептик, коагулирующий белки, обеспечивая девитализацию пульповой ткани,
- лидокаина гидрохлорид - локально анестезирующее средство, которое снижает вероятность возникновения болезненных реакций при девитализации пульпы,
- камфору - которая обладает противомикробным, обезболивающим и противовоспалительным действием.

Способ применения

На предварительно очищенную и широко раскрытую полость зуба накладывают необходимое количество пасты Devilat, избегая нажатия. Количество наложения пасты зависит от клинического случая и составляет примерно шарик 2 мм в диаметре. Затем полость без давления герметично покрывают водным дентином Tempolat-SC.

Полная девитализация пульпы происходит в течение 3-5 дней. После девитализации пульпы и при отсутствии болевых ощущений можно проводить экстирпацию пульпы и дальнейшее лечение. В случае проявления болевых ощущений применение пасты Devilat может быть повторено.

Побочные действия

При правильном хранении и соблюдении инструкции по применению побочные действия отсутствуют.

Предупреждение

Индивидуальная непереносимость.

Меры предосторожности

Проинформировать пациента о составе.

Противопоказания

- Аллергия на лидокаина гидрохлорид, формальдегид и другие составные части пасты.

- Избегать передозировки.

- При глотании значительного количества препарата обратиться к врачу.

Утилизация

Использованные изделия не представляют опасности для окружающей природной среды и могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Условия хранения

Хранить при температуре от 0°C до +25°C. После использования материал плотно закрыть.

Срок хранения 2 года.

Содержание упаковки

Паста в шприце по 3 г

Инструкция по применению



ЧП «Латус»

61010 г. Харьков

ул. Текстильная, 82

тел. + 380577332697

www.latus.com.ua

Только для профессионального использования



UA.TR.130

