



Endocort®

Цемент
цинкоксидэвгенольный

Назначение

Endocort предназначен для постоянного пломбирования корневых каналов всех групп зубов. При необходимости возможно использование штифта.

Свойства

Endocort - рентгеноконтрастный пломбировочный материал типа « порошок - жидкость », обладающий бактерицидными и антисептическими свойствами.

В качестве жидкости для замешивания используется Eugenol (эвгенол).

Рабочее время материала составляет 3-6 часов.

Отверждение материала в корневом канале происходит в течение 24-48 часов.

В случае необходимости отвержденный материал легко удаляется из канала зуба.

Способ применения

Корневой канал обрабатывают общепринятым способом - инструментально и медикаментозно. Высушивают сжатым воздухом.

На блокнот для замешивания помещают порошок и жидкость в соотношении 1мерник порошка и 1 капля жидкости. Компоненты тщательно замешивают в течение 20-30 секунд для получения плотной смеси, которую легко можно вносить в канал с помощью каналонаполнителя или с использованием необходимого штифта.

Полученной пастой заполняют корневой канал.

Затем проводят рентгеновский контроль заполнения канала, и приступают к пломбированию зуба.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материалы плотно закрыть.

ЧП «Латус»

61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697

www.latus.com.ua



UA.TR.002





Endocort®

Цемент
цинкоксидевгенольний

Призначення

Endocort призначений для постійного пломбування корневих каналів всіх груп зубів. При необхідності можливе використання штафта.

Властивості

Endocort - рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал типу «порошок-рідина», що має бактерицидні і антисептичні властивості.

В якості рідини для змішування використовується Eugenol (евгенол).

Робочий час матеріалу складає 3-6 годин.

Затвердіння матеріалу в корневому каналі відбувається протягом 24-48 годин.

В разі необхідності затверділий матеріал легко видаляється з каналу зуба.

Спосіб застосування

Корневий канал обробляють загальноприйнятим способом інструментально і медикаментозно. Висушують стисненим повітрям.

На блокнот для змішування поміщують порошок і рідину в співвідношенні 1 мірник порошку і 1 крапля рідини.

Компоненти ретельно змішують протягом 20-30 секунд для отримання однорідної маси, яку легко можна вносити в канал за допомогою каналонаповнювача або з використанням необхідного штафта.

Отриманою пастою заповнюють корневий канал.

Потім проводять рентгенівський контроль заповнення каналу, і приступають до пломбування зуба.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріали щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. + 380577332697
www.latus.com.ua



UA.TR.002

