

Инструкция по применению



Ftoroplen®-LC

Лак профилактический
светоотверждаемый
фторвыделяющий

Назначение

Лак Ftoroplen-LC предназначен для нанесения фторвыделяющего покрытия на передние зубы с целью повышения резистентности эмали, снятия повышенной чувствительности и профилактики кариеса.

Свойства

Ftoroplen-LC -представляет собой однокомпонентный лак на основе полимерного пленкообразующего, которое полимеризуется при помощи фотополимеризатора. Не требует протравливания поверхности зуба. В качестве активного агента содержит фториды натрия и кальция, выделяющие ионы фтора, которые

способствуют восстановлению зубной эмали и предохраняют зубы от развития кариеса.

Способ применения

Поверхность зубов очищают от налета и отложений, используя щетки, чашечки и пасту для клинической чистки.

Обработанную поверхность промывают водой и сушат сжатым воздухом. Наносят 1 слой лака равномерно на всю поверхность зуба при помощи кисточки или аппликатора, сушат сжатым воздухом в течение 20-30 секунд. Нанесенный лак полимеризуют в течение 20 секунд при помощи фотополимеризатора.

В течение 2 часов после манипуляций не рекомендуется принимать пищу. Правильно нанесенная пленка сохраняется на поверхности зуба до 7 суток.

Рекомендации

При хранении происходит оседание фторвыделяющего агента, поэтому перед применением содержимое флакона необходимо взболтать.

Пациентам рекомендуется в целях сохранения пленки щадяще проводить гигиенические

Редакция 06.2020

мероприятия. По истечении рекомендованного врачом времени нахождения пленки на зубах пациенты самостоятельно убирают ее путем более интенсивной чистки зубной щеткой.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**



Інструкція по застосуванню



Ftoroplen®-LC

Лак профілактичний
світлотверднучий,
що виділяє фтор

Призначення

Лак Ftoroplen-LC призначений для нанесення фторвиділяючого покриття на передні зуби з метою підвищення резистентності емалі, зняття підвищеної чутливості та профілактики карієсу.

Властивості

Ftoroplen-LC-представляє собою однокомпонентний лак на основі полімерного плівкостворюючого, здатного полімеризуватися за допомогою фотополімеризатора. Не потребує протруєння поверхні зуба. У якості активуючого агента містить фториди натрію та кальцію, які виділяють іони фтору, що сприяють відновленню зубної емалі та оберігають зуби від

розвитку карієсу.

Спосіб застосування

Поверхню зубів очищують від нальоту та відкладень, використовуючи щітки, чашечки та пасту для клінічної чистки. Оброблену поверхню промивають водою та сушать стисненим повітрям. Наносять один шар лаку рівномірно на всю поверхню зуба за допомогою пензлика або аплікатора, сушать стисненим повітрям протягом 20-30 секунд. Нанесений лак полімеризують протягом 20 секунд за допомогою фотополімеризатора.

Протягом 2 годин після маніпуляції не рекомендується приймати їжу. Правильно нанесена плівка лаку зберігається на поверхні зуба до 7 днів.

Рекомендації

При зберіганні відбувається невелике осідання фторвиділяючого агента, тому перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати.

Пацієнтам рекомендується у цілях зберігання лакової плівки обережно проводити гігієнічні процедури.

Редакція 06.2020

По закінченню рекомендованого лікарем часу знаходження плівки на зубах, пацієнти самостійно видаляють її шляхом більш інтенсивної чистки зубною щіткою.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
Тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

