



# Гипохлорит натрия 5%

Раствор для промывания  
корневых каналов

## Назначение

Гипохлорит натрия 5% предназначен для дезинфекции корневых каналов полостей зубов верхней и нижней челюсти в качестве бактерицидного средства после лечения воспалительных процессов и инструментальной обработки канала.

## Свойства

Препарат представляет собой водный раствор гипохлорита натрия концентрацией 5% с добавкой стабилизатора. Стабилизированный Гипохлорит натрия 5% в течение продолжительного времени хорошо сохраняет бактерицидные свойства раствора. Гипохлорит натрия 5% щадяще воздействует на слизистую оболочку полости рта.

## Способ применения

Небольшое количество Гипохлорита натрия 5% наносят на ватную турунду, которую помещают в корневой канал и оставляют на 5-10 минут. После чего турунду извлекают, а остатки Гипохлорита натрия 5% смывают водой. Затем канал

высушивают сжатым воздухом. Далее можно приступать к заполнению канала выбранным пломбирочным материалом.

## Предупреждение


В процессе хранения в растворе могут образовываться кристаллы, что не влияет на свойства раствора.

## Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»  
61010 г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

**Только для  
профессионального  
использования**

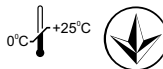



# Гіпохлорит натрію 5%

Розчин для промивання  
кореневих каналів

## Призначення

Гіпохлорит натрію 5% призначений для дезінфекції кореневих каналів порожнин зубів верхньої та нижньої щелеп у якості бактерицидного засобу після лікування запальних процесів та інструментальної обробки каналу.

## Властивості

Препарат представляє собою водний розчин гіпохлориту натрію концентрацією 5% з добавкою стабілізатора. Стабілізований Гіпохлорит натрію 5% протягом тривалого часу добре зберігає бактерицидні властивості розчину. Гіпохлорит натрію 5% дбайливо впливає на слизову оболонку ротової порожнини.

## Спосіб застосування

Невелику кількість Гіпохлориту натрію 5% наносять на ватну турунду, яку розташовують у кореновому каналі і залишають на 5-10 хвилин. Після чого турунду витягають, а залишки Гіпохлориту натрію 5% змивають водою. Потім канал

висушують стисненим повітрям. Далі можна приступати до заповнення каналу обраним пломбувальним матеріалом.

## Попередження

В процесі зберігання у розчині можуть утворюватися кристали, що не впливає на властивості розчину.

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»  
61010 м. Харків  
вул. Текстильна, 82  
Тел. + 380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

**Тільки для  
професійного  
використання**

