



Iodotemp® 25

Паста йодоформная

Назначение

Iodotemp 25 применяется в случаях острых и хронических периодонтитов путем временного заполнения (1-2 суток) каналов зуба с целью купирования воспалительных процессов.

Свойства

Iodotemp 25 представляет собой пластичную пасту с характерным запахом йодоформа. Пасту применяют непосредственным введением в канал на первом или втором посещении, в зависимости от случая, поскольку Iodotemp 25 исключает предварительную медикаментозную обработку каналов. Паста не твердеет, благодаря этому лечение можно возобновить во время следующего посещения, исключая риск сделать канал недоступным в результате полного и окончательного его заполнения.

Способ применения

Раскрывают пульповую камеру, очищают и расширяют вход в каналы, применяя жидкость для расширения каналов Trimlat или гелеобразную смазку Trimgel. Промывают теплой водой и сушат

слабой струей сжатого воздуха. Небольшое количество пасты вносят каналонаполнителем в верхнюю часть канала, а затем на дно полости при помощи штопфера, толщина слоя должна быть примерно 0,2...0,5 мм. Удаляют излишек пасты и пломбируют временным цементом (дентин пастой).

При следующем посещении удаляют временную пломбу, пасту Iodotemp 25 и, при необходимости, повторно вносят Iodotemp 25 или окончательно пломбируют канал.


Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**

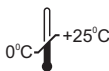



Iodotemp® 25

Паста йодоформна

Призначення

Iodotemp 25 застосовується у випадках гострих і хронічних періодонтитів шляхом тимчасового заповнення (1-2 доби) каналів зуба з метою купірування запальних процесів.

Властивості

Iodotemp 25 є пластичною пастою з характерним запахом йодоформу. Пасту застосовують безпосереднім введенням в канал на перших або других відвідинах, залежно від випадку, оскільки Iodotemp 25 виключає попередню медикаментозну обробку каналів. Паста не твердне, завдяки цьому лікування можна відновити під час наступних відвідин, виключаючи ризик зробити канал недоступним в наслідок повного і остаточного його заповнення.

Спосіб застосування

Розкривають пульпову камеру, очищують і розширюють вхід в канали, застосовуючи рідину для розширення каналів Trimlat або гелевидне мастило Trimgel. Промивають теплою водою і сушать слабким струменем

стисненого повітря. Невелику кількість пасти вносять каналонаповнювачем у верхню частину каналу, а потім - на дно порожнини за допомогою штопфера; товщина шару має бути приблизно 0,2...0,5 мм. Видаляють надлишок пасти і пломбують тимчасовим цементом (дентин-пастою).

При наступних відвідинах видаляють тимчасову пломбу, пасту Iodotemp 25 і, при необхідності, повторно вносять Iodotemp 25 або остаточно пломбують канал.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна, 82

тел. + 380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

