

# **Latewax**™ **Восковая проволока**

## **Назначение**

Восковая проволока Latewax предназначена для изготовления системы литников при литье металлических элементов зубных протезов.

## **Состав и свойства**

Представляет собой восковую композицию на основе парафина. Проволока обладает хорошей пластичностью. Выпускается диаметрами 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм и 5,0 мм.

## **Способ применения**

Литники соединяют с восковыми моделями слабо разогретым шпателем, расплавляя воск литника. Для депо металла при необходимости наносятся так называемые «муфты» на литники путем постепенного наслоения по каплям расплавленного на шпателе воска.

Из огнеупорной формы выплавка воска производится в муфельных печах при термообработке опок (согласно инструкции к


формовочной смеси) или в термошкафах при подъеме температуры до 200 °С.

## **Условия хранения и маркировка**

### Условия хранения

**Latewax** в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

### Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

---

ЧП "Латус"  
61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

## **Latewax**<sup>™</sup>

### **Воскова проволока**

#### **Призначення**

Воскова проволока **Latewax** призначена для виготовлення системи ливників при литті металевих елементів зубних протезів.

#### **Склад та властивості**

Представляє собою воскову композицію на основі парафіну. Проволока має гарну пластичність. Випускається діаметрами 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм і 5,0 мм.

#### **Спосіб застосування**

Ливники з'єднують з восковими моделями слабо розігрітим шпателем, розплавляючи віск ливника. Для депо металу при необхідності наносяться так звані «муфти» на ливники шляхом поступового нашарування по краплях розплавленого на шпателі воску.

З вогнетривкої форми виплавка воску проводиться в муфельних печах при термообробці опок (згідно з


інструкцією до формувальної суміші) або в термошкафах при підйомі температури до 200 °С.

#### **Умови зберігання та маркування**

##### Умови зберігання

**Latewax** в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

##### Маркування

Символ  вказує рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

---

ПП "Латус"

61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,

Тел. +380577332697

[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)