

Latewax™ **Воск моделировочный**

Назначение

Предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов, штифтовых зубов, фасеток и др. деталей с применением ручных инструментов.

Свойства

Воск моделировочный **Latewax** имеет умеренную твердость, легко обрабатывается, образуя тонкую «сухую» стружку. Воск выгорает практически беззолюно. Выпускается в виде брусков синего цвета, брусок для жевательных зубов имеет размеры (40x9x9) мм, для передних - (40x9x4,5) мм. В упаковке содержатся бруски для жевательных зубов и 2 бруска для передних зубов.

Способ применения

Для моделирования зубного ряда брусок воска подогревают до размягчения в теплой (45-50) °С воде или над пламенем горелки, затем формируют на гипсовой модели заготовку будущего зубного протеза, припасовывая к опорным зубам и зубам-антагонистам.


Моделирование инструментами осуществляют после охлаждения заготовки до комнатной температуры. Аналогичным образом моделируют другие детали протеза.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Latewax в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **CP** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

ЧП "Латус"

61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,
Тел. +380577332697 www.latus.com.ua

Latewax™

Віск моделювальний

Призначення

Призначений для моделювання проміжних ланок мостовидних протезів, штифтових зубів, фасеток та ін. деталей із застосуванням ручних інструментів.

Властивості

Віск моделювальний Latewax має помірну твердість, легко обробляється, утворюючи тонку «сухую» стружку. Віск вигорає практично беззольно. Випускається у вигляді брусків синього кольору, брусок для жувальних зубів має розмір (40x9x9) мм, для передніх - (40x9x4,5) мм.

Упаковка містить бруски для жувальних зубів та 2 бруски для передніх зубів.

Спосіб застосування

Для моделювання зубного ряду брусок воску підігрівають до розм'якшення в теплій (45-50)°С воді або над полум'ям пальника, потім формують на гіпсовій моделі заготовку майбутнього зубного протезу, припасовуючи до опорних зубів та зубів-


антагоністів. Моделювання інструментами виконується після охолодження заготовки до кімнатної температури. Аналогічним чином моделюються інші деталі протезу.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Latewax в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  вказує рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

ПП "Латус"
61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua