

# **Latewax**™ **Воск специальный выравнивающий**

## **Назначение**

Предназначен для устранения дефектов поверхности гипсовой модели зубного ряда.

## **Свойства**

Воск специальный выравнивающий **Latewax** имеет температуру плавления 82°C. Это позволяет применять при последующем использовании погружной воск (желтого цвета). Воск дает малую тепловую усадку, хорошо прилипает к гипсу, при застывании приобретает высокую твердость. Выпускается в виде брусков темно-красного цвета.

## **Способ применения**

От бруска нагретым шпателем отделяют каплю, заполняют ею дефект гипсовой поверхности и дополнительно разравнивают горячим шпателем для получения ровного прочного слоя воска на модели. По мере остывания воска выполняют моделирование поверхности обычными зуботехническими инструмента-


ми. Воск можно также применять и для других работ, учитывая при этом относительно высокую температуру застывания и несколько повышенную хрупкость.

## **Условия хранения и маркировка**

### Условия хранения

**Latewax** в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

### Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

---

ЧП "Латус"

61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

## **Latewax**™

### **Віск спеціальний вирівнювальний**

#### **Призначення**

Призначений для усунення дефектів поверхонь гіпсової моделі зубного ряду.

#### **Властивості**

Віск спеціальний вирівнювальний **Latewax** має температуру плавлення 82°C. Це дозволяє застосовувати при наступному використанні заглибний віск (жовтого кольору). Віск дає малу теплову усадку, добре прилипає до гіпсу, при застиганні здобуває високу твердість. Випускається у вигляді брусків темно-червоного кольору.

#### **Спосіб застосування**

Від бруска нагрітим шпателем від'єднують краплю, заповнюють нею дефект гіпсової поверхні та додатково розрівнюють гарячим шпателем для отримання рівного міцного шару воску на моделі. Під час застигання воску виконують моделювання поверхні звичайними


зуботехнічними інструментами. Віск можна також застосовувати і для інших робіт, враховуючи при цьому відносно високу температуру застигання та декілька підвищену крихкість.

#### **Умови зберігання та маркування**

##### Умови зберігання

**Latewax** в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

##### Маркування

Символ  вказує на рекомендований кінцевий термін використання виробу. Символ **CP** у таблиці позначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.

---

ПП "Латус"  
61010, м.Харків, вул. Текстильна, 82,  
Тел. +380577332697  
www.latus.com.ua