



# Replex<sup>®</sup>-SC

Цемент прокладочный гидроксидкальциевый химического отверждения

## Назначение

Цемент прокладочный гидроксидкальциевый химического отверждения Replex-SC предназначен к применению в стоматологии при лечении глубокого кариеса для защиты пульпы от бактериальных, химических, термических и механических воздействий.

## Свойства

Цемент Replex-SC состоит из основной и катализаторной паст Replex-SC текучей консистенции, которые после смешивания в соотношении 1:1 по объему, способны переходить в твердое состояние, сохраняя при этом некоторые упругоэластичные свойства. Рабочее время смеси паст при комнатной температуре - не менее 90 секунд, продолжительность отверждения в полости рта - не более 5 минут после помещения цемента в пломбуемый зуб.

Цемент Replex-SC обладает способностью к длительному поддержанию повышенной щелочной реакции (до pH 12), стимулирует регенерационные процессы в тканях зуба и оказывает антимикробное действие.

Отвержденная прокладка устойчива к кратковременному воздействию фосфорнокислых травильных составов.

## Способ применения

Перед наложением прокладки тщательно очищают и просушивают полость. На блокнот для замешивания выдавливают из шприца примерно равные по объему количества основной и катализаторной паст Replex-SC, которые тщательно смешивают шпателем в течение 20 секунд до получения однородной по цвету и консистенции смеси. Цемент набирают на шарик штопфера, вносят в зону рога пульпы слоем толщиной примерно 0,5 мм и распределяют штопфером по дну и частично по стенкам полости, не переходя дентин-эмалевую границу. Излишек пасты удаляют ватным шариком. Дают выдержку для отверждения прокладки 4-5 минут, после чего можно наносить, при необходимости, изолирующую прокладку или травильный состав по методике применения адгезивной системы.

## Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материалы плотно закрыть.

ЧП "Латус"  
61010, г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



**Только для профессионального использования**



**Інструкція по застосуванню****Replex®-SC**

Цемент прокладочний гідроксидкальцієвий  
хімічного твердіння

**Призначення**

Цемент прокладочний гідроксидкальцієвий хімічного твердіння Replex-SC призначений до застосування у стоматології при лікуванні глибокого карієсу для захисту пульпи від бактеріального, хімічного, термічного та механічного впливу.

**Властивості**

Цемент Replex-SC складається з основної та каталізаторної паст Replex-SC текучої консистенції, які після змішування в співвідношенні 1:1 по об'єму здатні переходити у твердий стан, зберігаючи при цьому деякі пружноеластичні властивості. Робочий час суміші при кімнатній температурі - не менше 90 секунд, тривалість твердіння в ротовій порожнині - не більше 5 хвилин після встановлення цементу в зуб, що пломбується.

Цемент Replex-SC має здатність до тривалого підтримання підвищеної лужної реакції (до pH 12), стимулює регенераційні процеси у тканинах зуба та чинить антимікробну дію.

Затверділа прокладка має стійкість до короткочасової дії фосфорнокислих труючих сполук.

**Спосіб застосування**

Перед накладенням прокладки ретельно очищують та висушують порожнину. На блокнот для замішування видавлюють зі шприца приблизно рівні по об'єму кількості основної та каталізаторної паст Replex-SC, які ретельно змішують шпателем протягом 20 секунд до отримання однорідної по кольору та консистенції суміші. Цемент набирають на кульку штопфера, вносять у зону рога пульпи шаром товщиною приблизно 0,5 мм і розподіляють штопфером по дну та частково по стінках порожнини, не переходячи дентин-емалеву межу. Надлишок пасту видаляють ватною кулькою. Дають витримку для твердіння прокладки 4-5 хвилин, після чого можна наносити, при необхідності, ізолюючу прокладку або труючу сполуку за методикою застосування адгезивної системи.

**Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.

ПП "Латус"

61010, м.Харків

вул. Текстильна, 82

Тел. +380577332697

[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



**Тільки для  
професійного  
використання**

