

Инструкция по применению



Vorkron®-11

Лак компенсационный

Назначение

Vorkron-11 используется при изготовлении зубных протезов для изоляции гипсовой модели от воска, а также для создания временного промежуточного слоя с целью компенсации усадки металла и образования дистанционного зазора на модели.

Свойства

Vorkron-11 представляет собой готовый к употреблению силиконовый лак, обладающий способностью быстро высыхать при комнатной температуре с образованием глянцево-

эластичной пленки.

Сухая пленка лака теплостойка, имеет достаточное сцепление с поверхностью гипса и, в то же время, может быть легко удалена щеткой или мягкой резинкой, от нее легко отделяется зуботехнический воск.

Способ применения

Перед нанесением лака выдавливают каплю лака из тубы, снимают ее мягкой кисточкой и наносят на гипс равномерным слоем 1-2 раза. Сушат каждый слой 3-7 минут при комнатной температуре. Однократное нанесение Vorkron-11 дает пленку толщиной 20 мкм.

Сразу после дозирования лака тубу плотно укупоривают бушоном. Кисточку промывают бензином, уайт-спиритом или мономером метилметакрилатом.

По мере расходования лака тубу необходимо сворачивать для предупреждения загустевания лака из-за попадания в внутрь тубы воздуха.

Редакция 08.2020

Внимание! Лак Vorkron-11 является огнеопасной жидкостью.


При работе с ним нельзя курить, пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами с открытой спиралью.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25 °С. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua

Только для профессионального использования

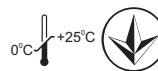

Інструкція по застосуванню



Vorkron®-11

Лак компенсаційний

Призначення

Vorkron-11 використовується при виготовленні зубних протезів для ізоляції гіпсової моделі від воску, а також для створення тимчасового проміжного шару на гіпсовій моделі з метою компенсації усадки металу та створення дистанційного зазору на моделі.

Властивості

Vorkron-11 являє собою готовий до вживання силіконовий лак, що володіє здатністю швидко висихати при кімнатній температурі з утворенням

глянцевої еластичної плівки.

Суха плівка лаку теплостійка, має достатнє зчеплення з поверхнею гіпсу і, в той же час, може бути легко видалена щіткою або м'якою гумкою, від неї легко відділяється зуботехнічний віск.

Спосіб застосування

Перед нанесенням лаку видавлюють краплю лаку з туби, знімають її м'яким пензликом і наносять на гіпс рівномірним шаром 1-2 рази. Сушать кожен шар 3-7 хвилин при кімнатній температурі.

Одноразове нанесення Vorkron-11 дає плівку товщиною 20 мкм.

Відразу після дозування лаку тубу щільно закупорюють бушоном. Пензлик промивають бензином, уайт-спіритом або мономером метилметакрилатом.

В міру витрати лаку тубу необхідно згортати для попередження загустіння лаку через попадання всередину туби повітря.

Редакція 08.2020

Увага! Лак Vorkron-11 є вогнебезпечною рідиною.

Під час роботи з ним не можна курити, користуватися відкритим вогнем, електроопалювальними приладами з відкритою спіраллю.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

Тільки для професійного використання

