




ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ • ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ • FOR FRONT TEETH

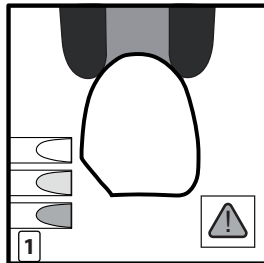


UA підготовка каріозної порожнини і підбір кольору;
RU подготовка каріозної порожнини и подбор цвета;
EN preparation of the caries cavity and selection of the color

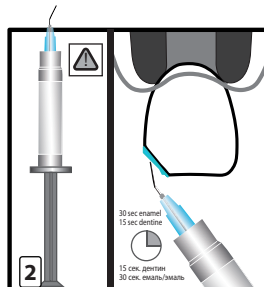


UA протруювання емалі та дентину;
RU протравливание эмали и дентина;
EN etching of enamel and dentine

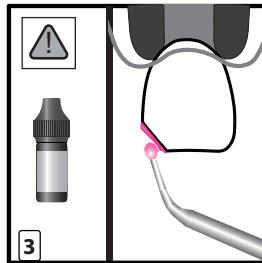


UA нанесення адгезиву без полімеризації;
RU нанесение адгезива без полимеризации;
EN applying the adhesive without polymerization

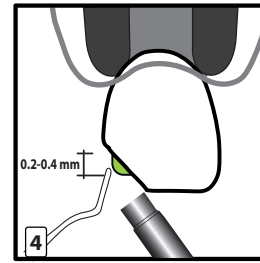

UA пломбування;
RU пломбирование;
EN filling

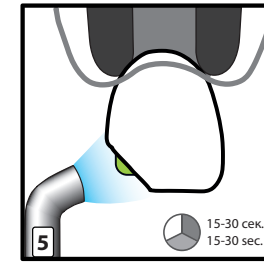


UA полімеризація кожного шару;
EN polymerization of each layer

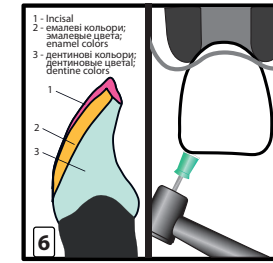


UA шліфування та полірування;
RU шлифовка и полировка;
EN grinding and polishing


ДЛЯ ЖУВАЛЬНИХ ЗУБІВ • ДЛЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ • FOR CHEWING TEETH

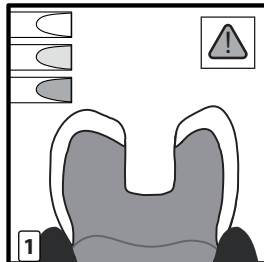


UA підготовка каріозної порожнини і підбір кольору;
RU подготовка каріозной полости и подбор цвета;
EN preparation of the caries cavity and selection of the color

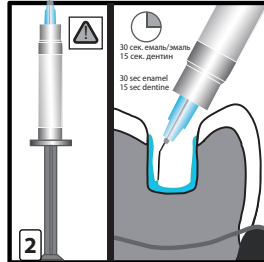


UA протруювання емалі та дентину;
RU протравливание эмали и дентина;
EN etching of enamel and dentine

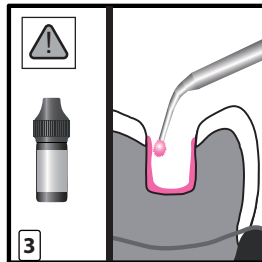


UA нанесення адгезиву без полімеризації;
RU нанесение адгезива без полимеризации;
EN applying the adhesive without polymerization

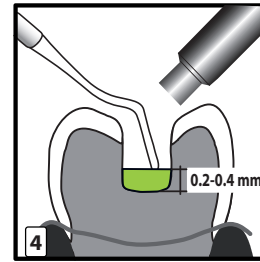

UA пломбування;
RU пломбирование;
EN filling

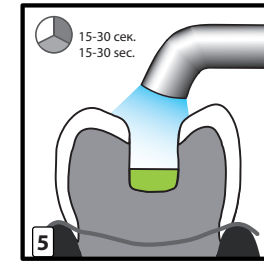

UA полімеризація кожного шару;
EN polymerization of each layer

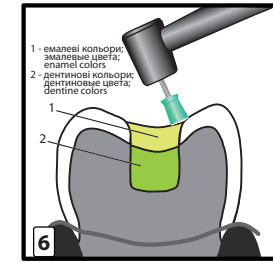

UA шліфування та полірування;
RU шлифовка и полировка;
EN grinding and polishing